

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) AN TAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego..
- 2) W okresie gwarancji AN TAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) AN TAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na adres AN TAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



AN TAR Sp. J.
03-068 Warszawa
ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel.: +48 22 518 36 00
Fax: +48 22 518 36 30
www.antar.net



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KULA PACHOWA AT51109



Wersja instrukcji obsługi: 2021-05-25.1

Data wydania aktualnej wersji instrukcji obsługi: 2021-05-25

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ

Kula pachowa jest wykonana z aluminiowych profili owalnego pokroju. Składa się z wyłożenia pachowego, rękojeści, wsporników bocznych szkieletu, antypoślizgowej nasadki. Kula posiada szeroki zakres regulacji wysokości (20 cm, 10 stopni, co 2,5 cm) dzięki regulatorowi zapadkowemu.

OPIS PRODUKTU:

1. Uniwersalna, na prawą i lewą stronę.
2. Wykonana z aluminium,
4. Regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm.
5. Maksymalne obciążenie 120 kg,
6. Nakładka gumowa: elastyczna, nie brudząca podłóg.
7. Rozmiar S: 92-112cm, waga: 0,7kg, M: 112-132cm, 0,75kg, L: 132-152cm, 0,80kg.
8. Okres użytkowania: 5 lat od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE:

Dla osób, które potrzebują wsparcia podczas chodzenia, po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo – ortopedycznych, przy niedowładzie, porażeniu kończyn dolnych.

PRZECIWSKAZANIA:

Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli.

UŻYTKOWANIE:

Po wyjęciu z opakowania należy rozsunąć kule na żadaną wysokość. Zaleca się, aby uchwyt kuli znajdował się na wysokości stawu biodrowego. Jest, aby uchwyt kuli znajdował się na

OSTRZEŻENIA

Kule można użytkować wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz na równej powierzchni.

Należy zachować dużą ostrożność używając kule na podłożu mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym, gdyż zwiększa to ryzyko upadku.

Co pewien czas należy dokonywać przeglądu wizualnego kuli w tym: sprawdzić działanie mechanizmu regulującego wysokość kuli oraz stanu nasadki. Jeżeli któryś z elementów kuli jest uszkodzony należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania wyrobu, ponieważ grozi to upadkiem.

Chronić przed wilgocią!

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych!

Nie przekraczać dopuszczonego maksymalnego obciążenia (120 kg)!

Nakazuje się sprawdzanie wyrobu przed i podczas użytkowania w celu upewnienia się, że podczas eksploatacji nie powstały zarysowania, pęknięcia itp.

KONSERWACJA:

Ramę i rękojeść kuli należy czyścić wilgotną szmatką przy użyciu łagodnych detergentów.

Na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów kuli (mechanizm regulacji wysokości).

Nie używać środków ściernych!

Nie czyścić kuli przy użyciu agregatów ciśnieniowych lub parowych!

UWAGA: do mycia wyrobu nie wolno stosować środków na bazie benzyn, rozpuszczalników, kwasów, chloru, itp.!

UWAGA:

Nie zawieszaj ani przytwierdzaj żadnych przedmiotów do laski. Niezastosowanie się tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem ciała (np. podczas upadku) i/lub wyrobu.

W celu zachowania parametrów użytkowych wyrobu ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób przechowywania. Przechowywanie wyrobu w wilgotnych pomieszczeniach (łaźnie, pralnie) lub na zewnątrz wpływa na utratę parametrów użytkowych i estetycznych wyrobu.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Osoby zmagające się z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji bądź kompensacji których przeznaczony jest niniejszy wyrób (patrz część dotycząca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji obsługi). Produkt może być zakupiony przez użytkownika samodzielnie lub na podstawie zaleceń lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zarówno w przypadku samodzielnego zakupu produktu, jak też wskazania przez lekarza/terapeute/innego specjalistę, należy wziąć pod uwagę dostępne rozmiary/niezbędne funkcje oraz warianty wyrobu, wskazania i przeciwwskazania do użytkowania, a także informacje dostarczone przez producenta.

Niniejszy symbol oznacza maksymalną wagę użytkownika

