

Uwaga

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- poważnego zagrożenia zdrowia publicznego należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uwaga

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Sposób utylizacji wyrobu po wycofaniu z eksploatacji

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KARTA GWARANCYJNA

Model:
Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy

- Firma AN TAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
- W okresie gwarancji AN TAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- AN TAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy AN TAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebiecia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
- Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
- NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.
- Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.



Antar Sp. J.
Adres: ul. Zawiańska 43, 03-068 Warszawa
TEL: +48 22 518 36 00
FAX: +48 22 518 36 30
E-mail: antar@antar.net
www.antar.net



Wersja instrukcji obsługi: 2021-05-25.1
Data wydania aktualnej wersji instrukcji obsługi: 2021-05-25



Instrukcja użytkowania


Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę

Modele: AT53005 (długa), AT53008 (krótka)




Orteza z tworzywa sztucznego na gołeń i stopę


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

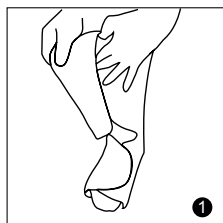

1. Umieść stopę i nogę w piankowej wkładce i zaciśnij tak, aby wkładka przylegała do stopy.

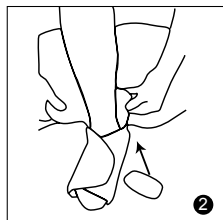


2. Dla lepszego dopasowania umieść poduszcзки wewnątrz wkładki lub pomiędzy wkładką a obudową.

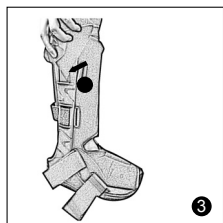


3. Stopę owinięta wkładką umieść w bucie i pociągnij pionowe podpórki po obu stronach lekko na zewnątrz. Boczna oś goleni powinna być wyrównana z obu stron do podpórek. Następnie zwolnij podpórki, aby przywarły do piankowej wkładki. Pierwszy pas od góry wsuń w otwory z obydwu stron obudowy.

do podpórek. Następnie zwolnij podpórki, aby przywarły do piankowej wkładki. Pierwszy pas od góry wsuń w otwory z obydwu stron obudowy.

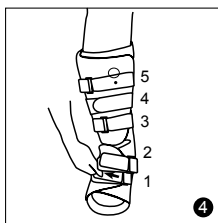


4. Zaciśnij wszystkie haczyki i pasy w kolejności od przodu stopy do górnej części nogi.

Dostosowywanie ciśnienia w komorze powietrznej

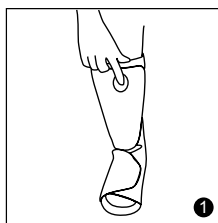

1. Przekręć przycisk na pozycję „pompuj”, po czym wciśnij pompkę, aby nadmuchać komorę.

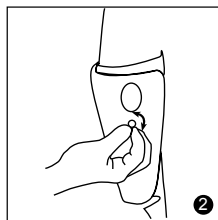

2. Przekręć przycisk na pozycję „wypuść powietrze”, aby spuścić powietrze.

Tabela rozmiarów

Rozmiar buta	
S	36 - 39
M	40 - 44
L	44 - 46,5
XL	46,5+

Rozmiary z tabeli dotyczą modeli AT53005 i AT53008
Długość: AT53005 - 45 cm, AT53008 - 28 cm

Instrukcja prania

- Przed praniem zdjąć elementy metalowe i obudowę.
- Prać ręcznie w zimnej wodzie, używając łagodnego mydła. Suszyć wyłącznie na powietrzu.
- Nie suszyć w suszarce, nie prać chemicznie ani nie używać wybielacza.
- Nie wystawiać na działanie źródeł ciepła.



Wskazania

- Stany po operacjach stopy lub kostki
- Stabilizacja złamań stopy lub kostki
- Umiarkowane lub silne skrzywienie kostki